


Crochet de maintien de capsule

usage unique

Classe IIa

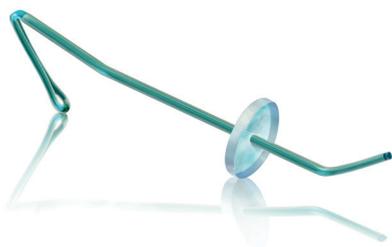

En cas de rupture zonulaire, système de crochets de soutien de capsule.

Les crochets s'installent comme des micro-crochets à iris mais maintiennent le bord du capsulorhexis.

Ils stabilisent la capsule et préviennent des nouvelles ruptures zonulaires.

Peut être utilisé en présence du syndrome de pseudo exfoliation, du syndrome de marfan ou d'un traumatisme.


Référence	MCR 0001
Conditionnement	Boîte de 6 blisters – 4 crochets par blister
Incision	0.8 mm à 1,2 mm
Matériau	Polypropylène ultra flexible avec gaine en polyester
Pose et retrait	Pose de part et d'autre de la rupture zonulaire. Retrait par l'incision principale.

INSTRUCTIONS

Retirez l'opercule du blister pour exposer les écarteurs et la baguette de silicone qui les maintient.

Retournez le blister pour faire tomber la baguette.

Pincez cette dernière entre le pouce et l'index pour libérer la pression sur l'écarteur capsulaire. Saisissez-le et relâchez doucement la baguette.

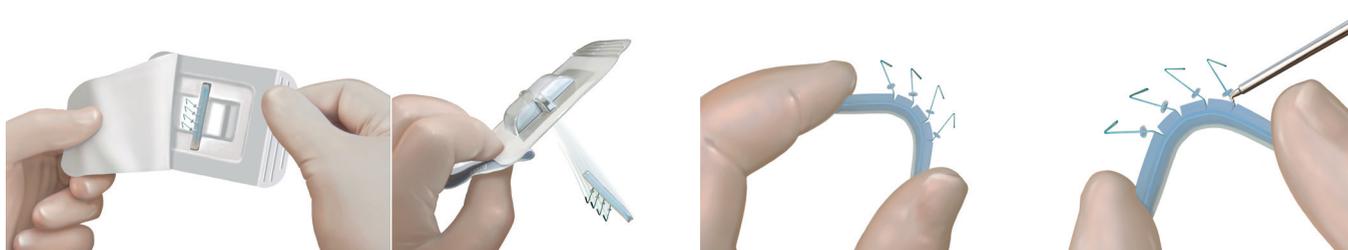

Crochet de maintien de capsule

usage unique



FABRIQUÉ PAR :
MICROSURGICAL TECHNOLOGY
www.microsurgical.com

DISTRIBUÉ PAR :
CUTTING EDGE
580 rue Max Planck
31670 LABÈGE / France
Tél. : +33 (0)5 62 24 65 03
www.cutting-edge.fr

CE
0473




*Non remboursable
Réservé aux professionnels de santé.
Se reporter à la notice d'utilisation.*



CUTTING EDGE
sense of innovation

PLACEMENT

- 1 Placer les crochets par une incision de 0.8mm ou plus large
- 2 Glisser l'embout sous le capsulorhexis
- 3 Reculer et mettre en place le disque silicone

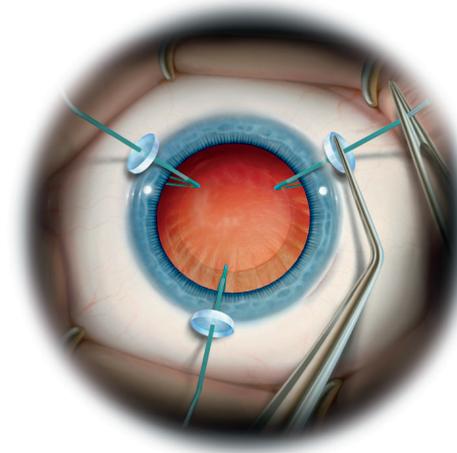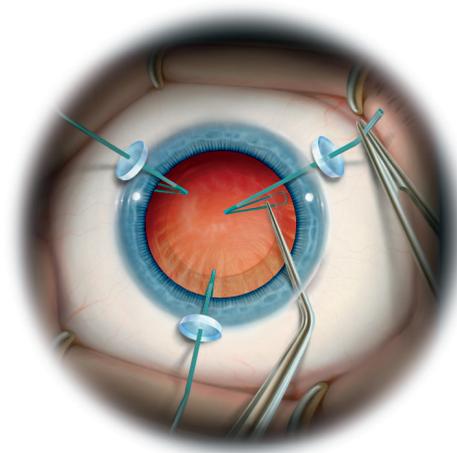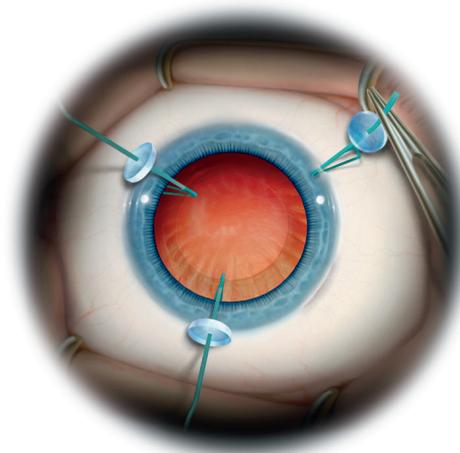

RETRAIT

- 1 Faire glisser le disque silicone vers l'arrière et désengager tout le crochet à capsule
- 2 Retirer le disque silicone
- 3 Faire sortir le crochet à capsule par l'incision principale en utilisant des pinces et couper l'embout si nécessaire

