



CANABRAVA RING



The future of vision

ANNEAU CANABRAVA

Anneau dilatateur d'iris

Marque	ANNEAU CANABRAVA
Référence	CANA - RING
Description et Indications	<p>Un anneau dilatateur d'iris conçu pour dilater l'iris en toute sécurité afin de simplifier la phacoémulsification, ainsi que les interventions chirurgicales dans lesquelles la pupille ne se dilate pas correctement à l'aide de produits pharmaceutiques. Il fournit une vision pupillaire.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anneau semi-circulaire à 300° avec ouverture à 60° et réalisé d'une seule pièce. • Ne nécessite pas d'injecteur. • Facile à adapter et à retirer. • L'anneau peut être inséré dans des incisions inférieures à 2 mm. • Facile à insérer dans les pupilles inférieures à 4,5 mm et dans les cavités peu profondes. • Visibilité optimale. • Dispositif jetable qui ne peut pas être re-stérilisé. <p>Indications:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Myosis, – Colobome, – Iridectomie sectorielle traumatique, – Syndrome de l'iris hypotonique peropératoire, – Prolapsus de l'iris, – Petites pupilles, – Tissu de l'iris rigide dû à une pseudoexfoliation, – Vitrectomie avec de petites pupilles.
Matériau	Polyméthacrylate de méthyle de qualité médicale (PMMA).
Méthode de stérilisation	Oxyde d'Ethylène (ETO).
Conditionnement	Stérile, à l'unité
Durée de vie	4.5 ans



DISTRIBUÉ PAR : CUTTING EDGE

Immeuble Le Nobel
 770 rue Alfred Nobel - 34000 Montpellier - France
 Tel : +33 (0)5 62 24 65 03
 Fax : +33 (0)5 62 24 65 05
commandes@cutting-edge.fr - www.cutting-edge.fr

FABRIQUÉ PAR : AJL OPHTHALMIC, S.A.
 Parque Tecnológico de Álava. C/ Ferdinand Zeppelin 1, 01510 Miñano, Álava. Spain •
 T: +34 945 298 256 • F: +34 945 298 209
ajlsa@ajlsa.com - www.ajlsa.com



Réservé aux professionnels de santé. Se reporter à la notice d'utilisation.




Informations importantes à propos de l'anneau Canabrava

1. Position de l'implant

L'anneau Canabrava est composé de petits œillets Fig. 1 et de grands œillets Fig. 2, ainsi que 2 crochets d'amarrage Fig. 3 alternativement positionnés autour de l'anneau - l'un tourné vers le haut et l'autre vers le bas.

Important : Les œillets inférieurs (petits) et les crochets doivent être en dessous de l'iris et les œillets supérieurs (grands) doivent être au-dessus. Si l'anneau est placé à l'envers, l'implantation ne sera pas possible.

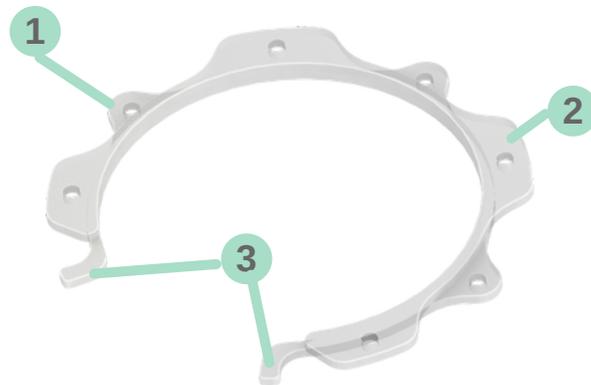

2. Commencer avec des cas simples

Comme il s'agit d'une nouvelle technique, nous recommandons de commencer par des cas plus simples pour garantir un développement de la technique en toute sécurité.

- Pupilles sans fibrose
- Diamètres pupillaires de 3,5 à 4,5 mm
- Pupilles à anatomie préservée

Du matériel audio-visuel est disponible montrant l'efficacité de l'anneau chez les pupilles de toutes tailles et les principales complications consécutives à la formation du chirurgien.

3. Importance du diamètre "Blanc à Blanc"

L'anneau a été conçu pour être implanté dans des yeux d'un diamètre "blanc à blanc" normal à large, c'est-à-dire supérieur à 11 mm.



AJL OPHTHALMIC, SA

Parque Tecnológico de Álava, -C/Ferdinand Zeppelin, 1, -01510 Miñano (Álava)

Teléfono: 0034 945 298 256 -email: ajlsa@ajlsa.com